

**Ściągacz neoprenowy stawu kolanowego**  
**Knee support**  
**Bandáž neoprénová kolenního kloubu**  
**Эластичная повязка на коленный сустав**

INSTRUKCJA.....	2
INSTRUCTIONS.....	3
Knee support .....	4
Bandáž neoprénová kolenního kloubu .....	5
Эластичная повязка на коленный сустав .....	6

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**



**UŻYTKOWANIE:**

1. Ściągacz należy delikatnie naciągnąć na odpowiedni staw. Powinien być tak dopasowany, aby nie powodował zbytniego ucisku.
2. Właściwy rozmiar należy dobrać odpowiednio do rozmiaru stawu. W przypadku, gdy Państwa rozmiar jest na granicy dwóch rozmiarów należy wybrać rozmiar większy.
3. Ściągacz należy prać w zimnej wodzie w łagodnych środkach piorących. Dokładnie wypłukać. Suszyć w temperaturze pokojowej. Nie prać, ani nie wirować w pralce.

**PRZECIWWSKAZANIA:**

Zapalenie skóry, wszelkie uszkodzenia skóry, zapalenie żył lub zaburzenia krążenia. Jeżeli podczas użytkowania wystąpi podrażnienie skóry, należy natychmiast zaprzestać używania produktu i skonsultować się z lekarzem.

**MATERIAŁ:**

70% neopren  
15% poliester  
15% nylon